



Liceul Teoretic  
Constantin Noica Sibiu  
Sibiu, Str. Oștirii, Nr.5, 550388, Jud. Sibiu  
Tel/Fax: 0040-269233790  
E-mail: lcnoica@yahoo.com

LICEUL TEORETIC  
"CONSTANTIN NOICA" SIBIU  
NR. 1580 / 3.12.2021

**Dragi părinți,**

De mai bine de un an de zile se discută de siguranță și de posibilitățile de a ne proteja. Trebuie să înțelegem că buna colaborare părinte-elev-profesor se exprimă și prin această formă de testare, prin care toți putem contribui la creșterea siguranței, dar și pentru a putea privi mai optimist activitatea copilului nostru în școală.

**În niciun caz, nu trebuie să o tratăm ca pe o măsură coercitivă.**

Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs.

**Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:**

1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test;
2. Se păstrează testele între +2 - +30 °C;
3. Se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;
4. Se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;
5. Se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului;
6. Se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și suprafețelor.

**Pentru testarea propriu-zisă:**

1. Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se folosește cât de curând posibil;
2. Se așează dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;
3. Se scoate un tub de extracție și o sticlă de soluție. Scoateți capacul și adăugați soluția în tubul de extracție;
4. Se scuipă saliva în recipientul pentru colectare a salivei;
5. Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție;
6. Se îndoiește și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical;
7. Se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția;
8. Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (caseta);
9. Se citește rezultatul după 10-15 minute;

**10. Se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:**

**Pozitiv:** Apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), **indiferent de intensitatea liniei de testare.**

**Negativ:** O linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T).

**Neconcludent:** Linia de control nu apare. Cauzele posibile sunt volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural. Elevul se va testa din nou la cabinetul medical școlar.

**În cazul elevilor cu rezultat pozitiv la testul antigen efectuat la domiciliu, părinții/reprezentanții legali/elevii majori au obligația de a comunica învățătorului/dirigintelui, în cel mai scurt timp, rezultatul testului, în fiecare zi de luni și joi.**

De asemenea, va aducem la cunoștință faptul că unitatea școlară raportează către DSP cazurile cu rezultat pozitiv la test, în vederea asigurării testării lor, fie prin test antigen rapid, fie PCR.

Direcțiunea

